

Euphralia®

OCCHI SECCHI

GOCCE OCULARI LUBRIFICANTI

Euphralia occhi secchi gocce oculari lubrificanti a base di sodio ialuronato 0,4% e acque distillate è una soluzione sterile per uso oftalmico con un pH fisiologico, contenente sodio ialuronato e acque distillate di ginkgo biloba, mirtillo, finocchio e centella asiatica. La soluzione è confezionata in pratici contenitori polidose da 10 ml, senza conservanti. Il sodio ialuronato conferisce al dispositivo medico proprietà mucomimetiche e visco-elastiche in modo da garantire un'adeguata lubrificazione della superficie oculare, proteggendola dall'attrito generato dai movimenti oculari. Inoltre, il polimero è in grado di trattenere l'acqua: per questo motivo la soluzione è in grado di mantenere umidificata la superficie oculare e aumentare la stabilità del film lacrimale, proteggendo la mucosa oculare dagli agenti esterni. Il ginkgo biloba migliora la visibilità a distanze elevate, allevia la stanchezza e l'arrossamento degli occhi e delle mucose oculari. Tale pianta, insieme con la centella asiatica, è utilizzata in quanto particolarmente utili nel coadiuvare i processi di riduzione delle irritazioni. Il mirtillo nel contesto della formulazione è utilizzato per le sue proprietà rinfrescanti: dà sollievo agli occhi stanchi e funge da protezione per la mucosa oculare contro gli agenti atmosferici e contro i fattori ambientali. Il finocchio viene utilizzato nei disordini oculari per lenire la sensazione di bruciore e, insieme con il mirtillo, sono utilizzate per la loro azione riparatrice. Tali piante utilizzate sotto forma di acque distillate, nel contesto della formulazione esplicano un'azione lenitiva, rinfrescante e protettiva. La soluzione contiene acido bórico e sodio tetraborato decaidrato, come sistema tampone, e sodio cloruro così da garantire una soluzione fisiologica.

Pertanto, **Euphralia occhi secchi gocce oculari lubrificanti** svolge un'azione idratante e lubrificante per la superficie oculare e dà un temporaneo sollievo al bruciore, all'irritazione ed ai disagi correlati alla secchezza oculare. Inoltre, può essere utilizzato come protezione per irritazioni dovute ad altri fattori. **Euphralia occhi secchi gocce oculari lubrificanti** può esser utilizzato con lenti a contatto, senza necessità di rimuoverle. Il dispositivo può essere utilizzato dai bambini a seguito di consulto medico.

INDICAZIONI D'USO

Euphralia occhi secchi gocce oculari lubrificanti protegge e ripara la mucosa oculare ed è indicato per rinfrescare, lenire e lubrificare la mucosa irritata o nel caso vi siano disturbi da occhio secco. Le cause più comuni che determinano secchezza oculare e irritazione possono essere:

- Uso di lenti a contatto per molte ore consecutive.
- Motivi ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione alla radiazione solare, vento, fumo, inquinamento).
- Occhio secco causato da eccessive ore di studio, da troppo ore di lavoro al pc, dalla sindrome dell'occhio secco

ISTRUZIONI PER L'USO

Il dispositivo medico è indicato anche per portatori di lenti a contatto.

Il dispositivo può essere utilizzato dai bambini a seguito di consulto medico.

- Prima della prima somministrazione rimuovere il sigillo di sicurezza e rimuovere il tappo di protezione.
- Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il contenitore.
- In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario. Esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto.
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone: il contenuto può esser riutilizzato entro 6 mesi dalla prima apertura.
- Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno, in base al bisogno o alle indicazioni del medico.

COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato, acqua distillata di ginkgo biloba, acqua distillata di mirtillo nero, acqua distillata di finocchio, acqua distillata di centella asiatica, acido borico, sodio tetraborato, sodio cloruro, acqua ppi. Non contiene conservanti.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare il prodotto se il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità del flacone.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- In caso di effetti indesiderati, interrompere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

EFFETTI INDESIDERATI

Ad oggi non è noto alcun effetto indesiderato.

CONFEZIONAMENTO

Flacone da 10 ml, senza conservanti.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Il contenuto del polidose può essere riutilizzato entro 6 mesi dalla prima apertura.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.

C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15

40019 - Sant'Agata Bolognese (Bo) Italia

Distributore: **Laboratoires Boiron s.r.l.**

Via Uberto Visconti di Modrone, 33

20122 Milano - ITALIA

www.boiron.it

 **0373**
DISPOSITIVO MEDICO

ASTUCCIO	PAP 21	Raccolta Carta
FLACONE CON EROGATORE	C/PE 92	Raccolta Plastica
TAPPO	LDPE 4	
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Non separare il flacone dall'erogatore. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.		

Ultima revisione 04.01 del 05/2017