

Euphralia® GARZE

Garze sterili monouso imbevute di soluzione isotonica a base di Acido ialuronico, Camomilla ed Elicriso ad azione idratante, emolliente, decongestionante e detergente delle palpebre interne ed esterne, della zona perioculare e delle ciglia. Indicate per adulti e bambini fin dai primi giorni di vita.

Contrastano gli arrossamenti, la lacrimazione ed il prurito. Riducono il senso di secchezza e la sensazione di corpi estranei negli occhi.

INDICAZIONI

- Detersione, idratazione e decongestione delle palpebre interne, esterne e dell'area perioculare, anche in caso di portatori di lenti a contatto.
- Coadiuvante in caso di patologie oculari di tipo allergenico o infettivo (congiuntiviti, blefariti, orzaiolo, calazio), di problematiche associate a disturbi della tiroide, infezioni di diversa natura, implicazioni oftalmologiche associate a patologie quali diabete e carenza di vitamine A, B, PP o in associazione alla terapia indicata dall'oculista.
- Ipersensibilità oculare indotta da fattori ambientali quali polveri, smog, pollini o da un'esposizione prolungata a schermi video.
- Detersione e idratazione prima e dopo interventi di chirurgia oftalmica.

INGREDIENTI FUNZIONALI

Garze sterili imbevute di soluzione detergente isotonica a base di:

- **Acido ialuronico** (*Sodium hyaluronate*) dalle proprietà idratanti, umettanti e distensive.
- **Camomilla** (*Chamomilla recutita extract*) dalle proprietà lenitive, decongestionanti, rinfrescanti, antinfiammatorie, disarrossanti ed antipruriginose.
- **Elicriso** (*Helichrysum italicum extract*) dalle proprietà antinfiammatorie, antiossidanti con azione fotoprotettiva contro i raggi UV e decongestionanti.

COMPOSIZIONE

Sodium hyaluronate, Chamomilla recutita extract, Helichrysum italicum extract, Polysorbate 20, Lauryl glucoside, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate.

MODALITÀ D'USO

- Lavarsi accuratamente le mani e aprire la bustina utilizzando l'apertura facilitata.
- Estrarre la garza e passarla più volte, delicatamente, all'interno della palpebra e sull'area perioculare in modo da assicurare una corretta igiene.
- Una volta ammorbidita l'eventuale secrezione, rimuovere i detriti o le squame ciliari con un delicato movimento verso l'esterno.
- Utilizzare una garza per ciascun occhio.
- Non risciacquare e non asciugare l'area interessata.

USO SUI BAMBINI

Euphralia® GARZE possono essere usate sui bambini fin dai primi giorni di vita.

Nei bambini si raccomanda l'uso prettamente esterno per la pulizia delle ciglia e della zona perioculare ad occhio chiuso.

TOLLERABILITÀ TISSUTALE E BIOCOMPATIBILITÀ

Euphralia® GARZE non bruciano e non provocano dolore.

Euphralia® GARZE non sono irritanti e sensibilizzanti.

Euphralia® GARZE sono compatibili con le altre medicazioni oftalmiche.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALE ED AVVERTENZE

Il prodotto sterile è idoneo alla pulizia dell'interno della palpebra e dell'area perioculare. Operare con particolare delicatezza nel caso in cui si usi il dispositivo all'interno della palpebra.

Utilizzare solo confezioni integre e non danneggiate. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di calore dirette e/o da raggi solari diretti. Utilizzare solo entro il periodo di validità, prestando attenzione alla data di scadenza.

Rev. 01 2025/07



STERILE



Welcare Industries S.p.A.
Via dei Falegnami, 7
05018 Orvieto (TR) - Italia
www.welcareindustries.com



Laboratoires Boiron s.r.l.
Via Uberto Visconti di Modrone, 33
20122 Milano - Italia

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ASTUCCIO	PAP21	CARTA
FOGLIETTO	PAP22	CARTA
BUSTINA	C/LDPE90	PLASTICA
GARZA	TEX62-69	INDIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.